

Nuevo Teclado Virtual Profesional.

Para personas con exigencia profesional, ideal para desarrollar actividades educativas en los diferentes niveles secundario, universitario y todo el ámbito laboral.


Además de ser muy útil en pacientes internados con dificultades de la comunicación.

Sus Principales características:

- Adaptabilidad a los nuevos modelos de Note Books.
- Conexión USB.
- Doble Mouse:
 - Interno. Para aplicaciones comunes.
 - Externos para aplicaciones que requieren un manejo de pantalla completa, como por ejemplo el Autocad.
- Sistema de Predicción de Palabras y Abreviaturas.
- Reproducción oral de texto en pantalla.
- Menú alternativo para simplificar el uso del teclado.
- Programa de Inicio seleccionable por el usuario. Por ejemplo cuando se inicia el Teclado Virtual se puede elegir con que programa vamos a trabajar. Por ejemplo el Word.
- Mensajería instantánea de Necesidades Personales reproducidas oralmente. Por ejemplo “Tengo Dolor”.
- Mensajería instantánea con frases preescritas, ideal para el chateo o para ingresos a cuentas personales de correo electrónico.
- Menú de Programas. Simplemente elegimos el programa a utilizar con un simple Clic, sin ir al Menú de INICIO o navegar por el ESCRITORIO.


Opcionales:

- Control de llamadas telefónicas. Recibir y realizar llamadas.
- Envío de Fax.
- Control Remoto para el manejo de la TV, el CD, DVD, Radio.
- Acceso a RELHOG (Red Local Hogareña) para un manejo total de la vivienda y del confort personal.
 - Encendido y apagado de luces.
 - Subir y bajar la Cama.
 - Correr la cortinas.
 - Subir y Bajar las persianas.
 - Aire Acondicionado.
 - Control de puertas.
 - Intercomunicación entre habitaciones.

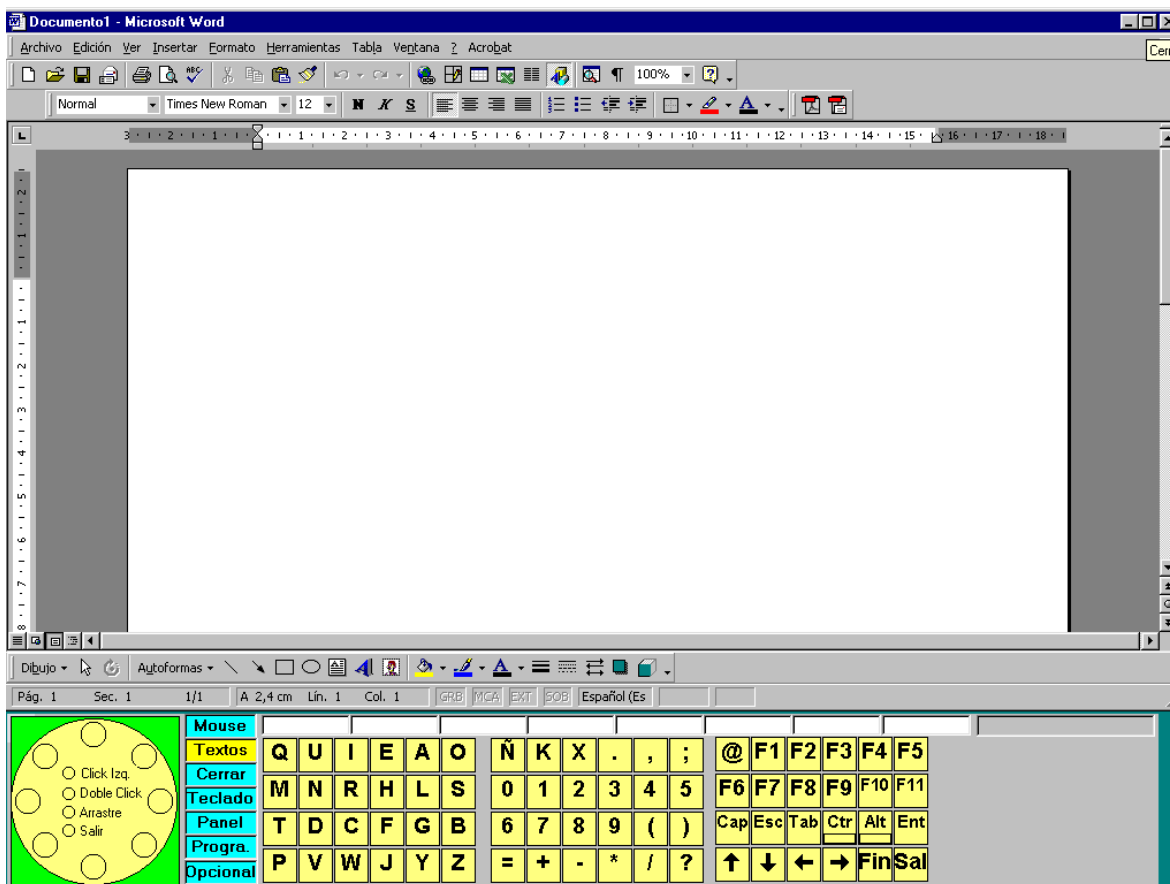


Vista general del Teclado Virtual.

Descripción General:

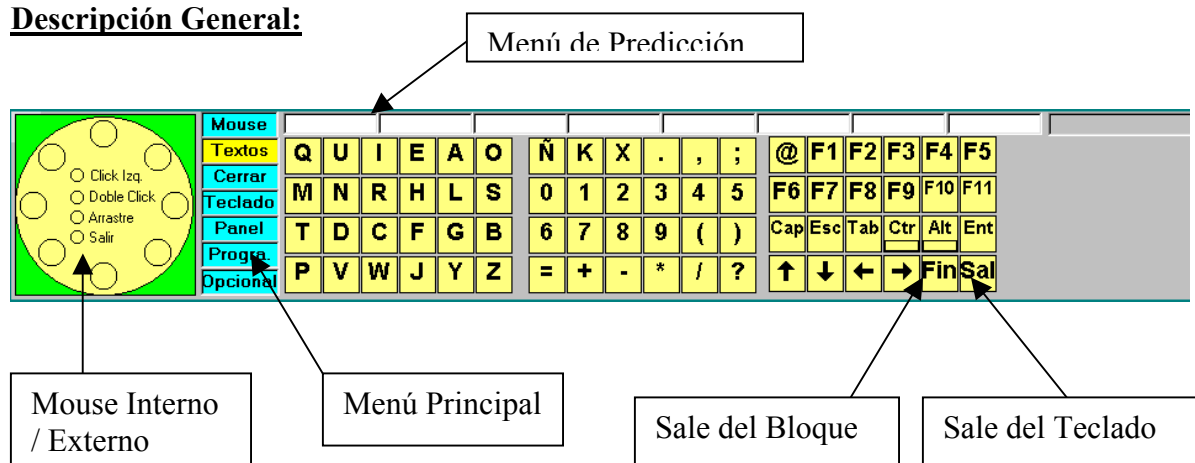


Menú Principal


Mouse: Activa la utilización del Mouse. Depende de cual este seleccionado en el panel de control. Interno es el mostrado en la figura. El externo aparecerá el logo de CAMAC.

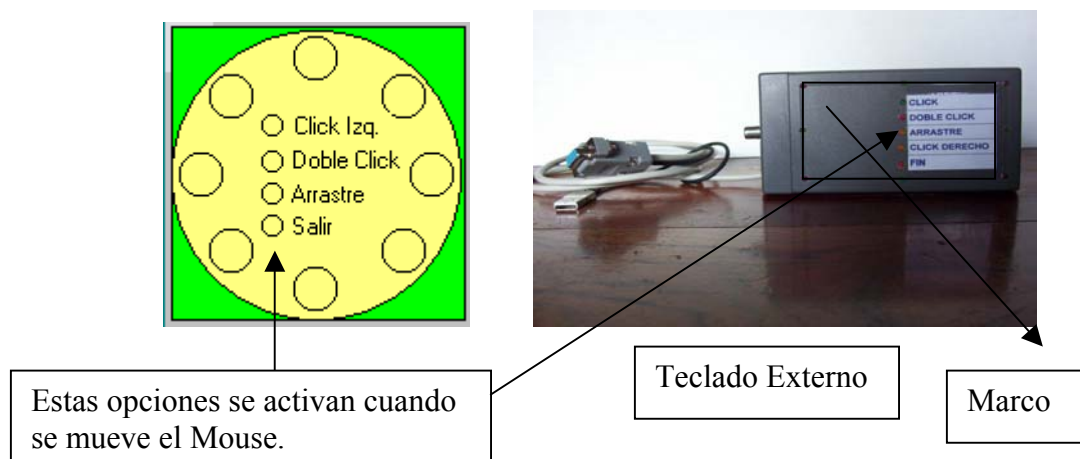

El movimiento del ratón dependerá de los ajustes de velocidades y aceleración desde el panel de control.

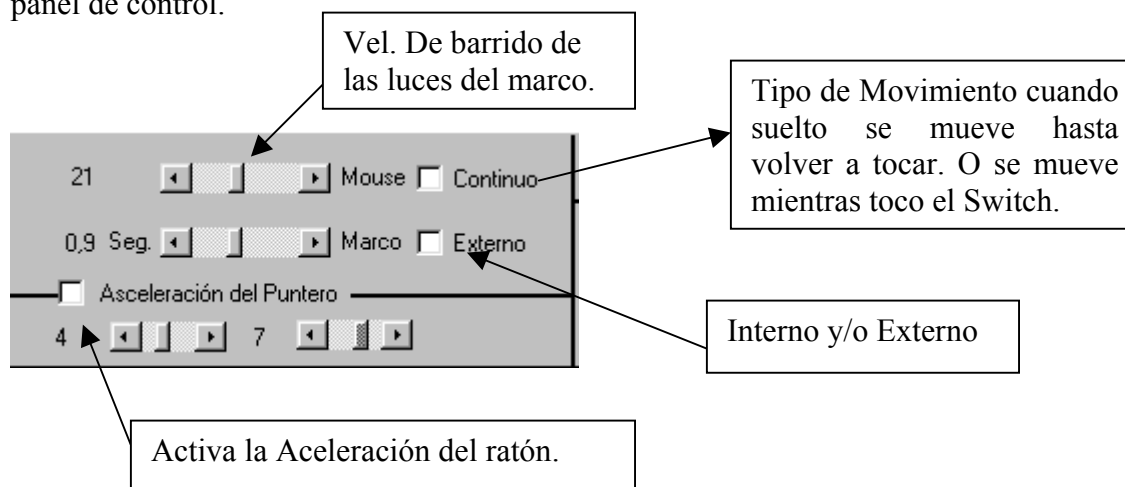


Texto: Activa la ventana de Texto

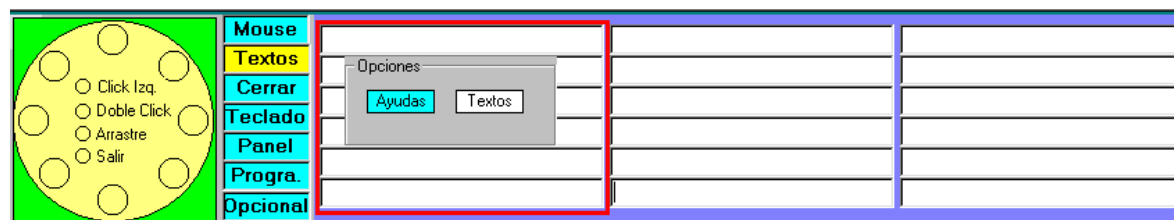


Si Seleccionamos Ayudas:

Aparecerán Mensajes preestablecidos tipo “Tengo Dolor” que al ser seleccionados el programa reproducirá el mismo.

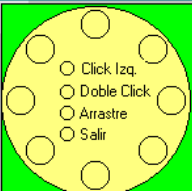 - Click Izq. - Doble Click - Arrastre - Salir	Mouse	Quiero Tomar algo...	Quiero Salir al Parque		
	Textos	Quiero Comer algo...	Tengo mucho dolor		
	Cerrar	Quiero ir al Baño...	Llamar al Médico		
	Teclado	Quiero Escuchar Radio	Llamar a Mamá		
	Panel	Quiero Leer un Libro	Llamar a Carlos		
	Progra.	Quiero ir a dormir			Salir
Opcional					

Para agregar algún otro mensaje por un tercero ubicar el puntero del mouse sobre el casillero a escribir luego apretar Enter. Automáticamente será grabado. En el caso de hacerlo desde el programa ABRIR el archivo **emerg.txt** de la carpeta CAMAC.


Si Seleccionamos Texto:

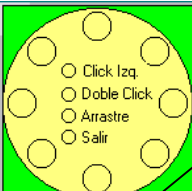 - Click Izq. - Doble Click - Arrastre - Salir	Mouse	jose_1290@hotmail.com	hola como estan		
	Textos	*****	estoy aburrido en este chat		
	Cerrar	jose_1290@yahoo.com.ar			
	Teclado	*****			
	Panel	jose_1290@laca.com.ar			
	Progra.	*****			Salir
Opcional					

Texto para ingreso a cuentas de correos.

Clave de Ingreso

Utilizado para enviar mensajes a un chat, llenar direcciones de internet, nombres y claves de usuario. Una vez seleccionado el texto seleccionar Enviar o de lo contrario Cancelar.

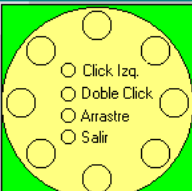
 - Click Izq. - Doble Click - Arrastre - Salir	Mouse	jose_1290@hotmail.com	hola como estan		
	Textos	*****	esto	Opciones	
	Cerrar	jose_1290@yahoo.com.ar		Enviar	Cancelar
	Teclado	*****			
	Panel	jose_1290@laca.com.ar			
	Progra.	*****			Salir
Opcional					

Para salir de esta opción ir hasta el último bloque y seleccionar **Salir**.


Cerrar: Sirve para finalizar los programas sin necesidad de ir hasta la cruz o la opción de salir.

Teclado: Habilita el uso del teclado virtual. La secuencia es la siguiente se pintará de rojo un bloque a la vez.


Seleccionado un bloque.

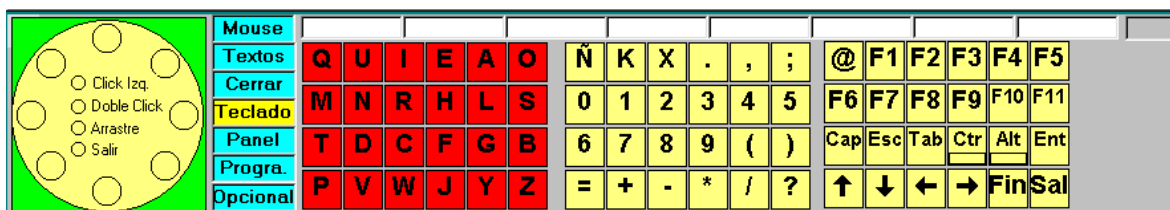

Se pintarán de rojo cada una de las filas del bloque seleccionado.

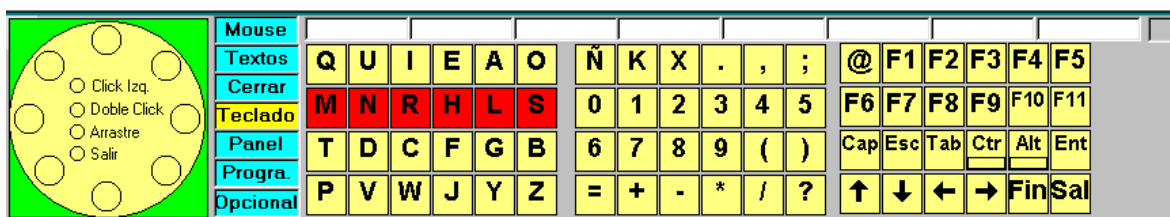

Seleccionado la fila, se pintará de rojo cada columna, elegida la letra o la función activar el sensor. Si se mantiene apretado el sensor la letra comenzará a escribirse en forma repetitiva respetando el tiempo de repetición seleccionando desde el panel de control.

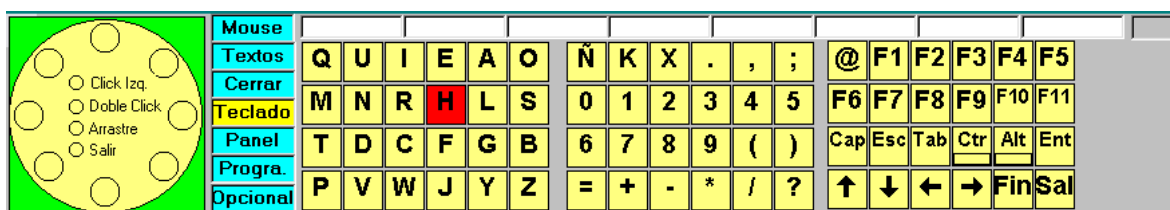


Luego de escribir la letra y finalizando el barrido aparecerá un menú de gestión de teclado.



Anular: Omite este Menú.
Vocales: El cursor se dirige a la fila de las vocales.
Espacio: Escribe Espacio.
Enter: Cambia de renglón.
Borrar: Borra el último carácter.
Volver: En el caso de haber olvidado una letra de la misma fila nos permite volver.
Salir: Salimos del Bloque para elegir otro.

Panel: Habilita el panel de control general del sistema.

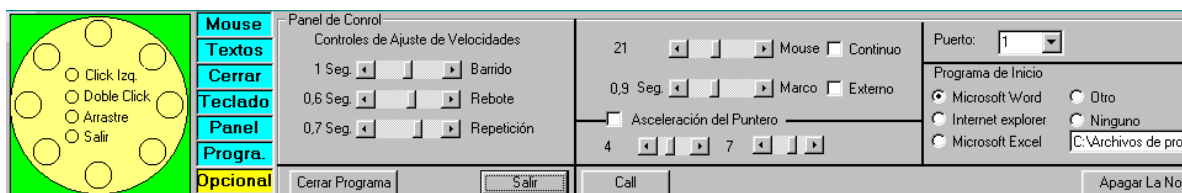

Controles de Ajuste de velocidad:




Barrido: Controla la velocidad de Scan o Barrido General.


Rebote: Permite ajustar la demora entre el pasaje vertical al horizontal o entre horizontales.

Repetición: Varia la velocidad de repetición de las letras sobre un documento.

Selección del Puerto y programas de Inicio:

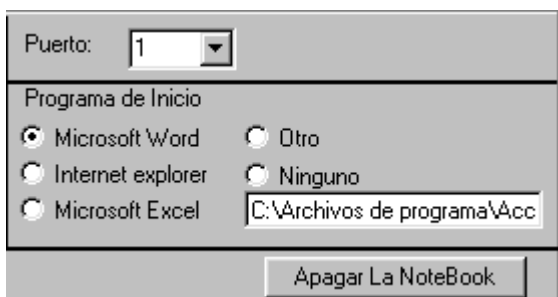

Extras:

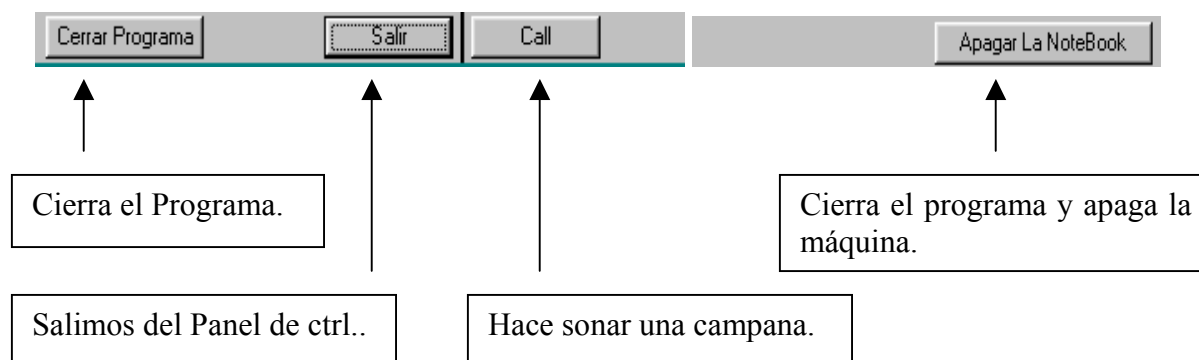

	Mouse						
	Textos						
	Cerrar						
	Teclado						
	Panel						
Progra.							
Opcional							

Mouse

- Click Izq.
- Doble Click
- Arrastre
- Salir

Textos

Cerrar

Teclado

Panel

Progra.

Opcional

Abrir

Buscar en: Office

1034

3082

Bitmaps

Borders

bots

fpclass

Html

images

Macros

Queries

Samples

Shortcut Bar

Nombre de archivo: *.exe

Tipo de archivos: *.exe

☐ Abrir como sólo lectura

Abrir

Cancelar

Las reproducción de los mensajes y la lectura del documento, la velocidad de rebote, la distribución de las letras, la ejecución de los programas desde una ventana, el mouse interno y externo, son Ideas y desarrollos del Ing. Luis Campos diseñando teclados virtuales desde 1986, cualquier apropiación de algunas de estas ideas sin autorización del autor estarán infringiendo la Ley de propiedad Intelectual.



Control remoto conectado a Pc.

Características:

Puede controlar hasta 6 equipos en una sala, si estuvieran en salas diferentes agregamos unidades infrarrojas remotas.




Funciones que se pueden control:

- Encender y Apagar
- Más Canales
- Menos Canales
- Más Volumen
- Menos Volumen
- Canales independientes.
- Mute
- Avanzar
- Retroceder
- Reproducir CD, DVD, Video.

Red Local Hogareña.

El concepto RELHOG es haber diseñado un sistema domótico, simple de instalar, versatilidad de conectividad con cualquier elemento eléctrico de la casa, integra además un sistema de seguridad en el hogar identificando puntualmente el elemento vulnerado **“Puerta del patio abierta”** y lo mas importante el costo el mas barato de Europa y EEUU.

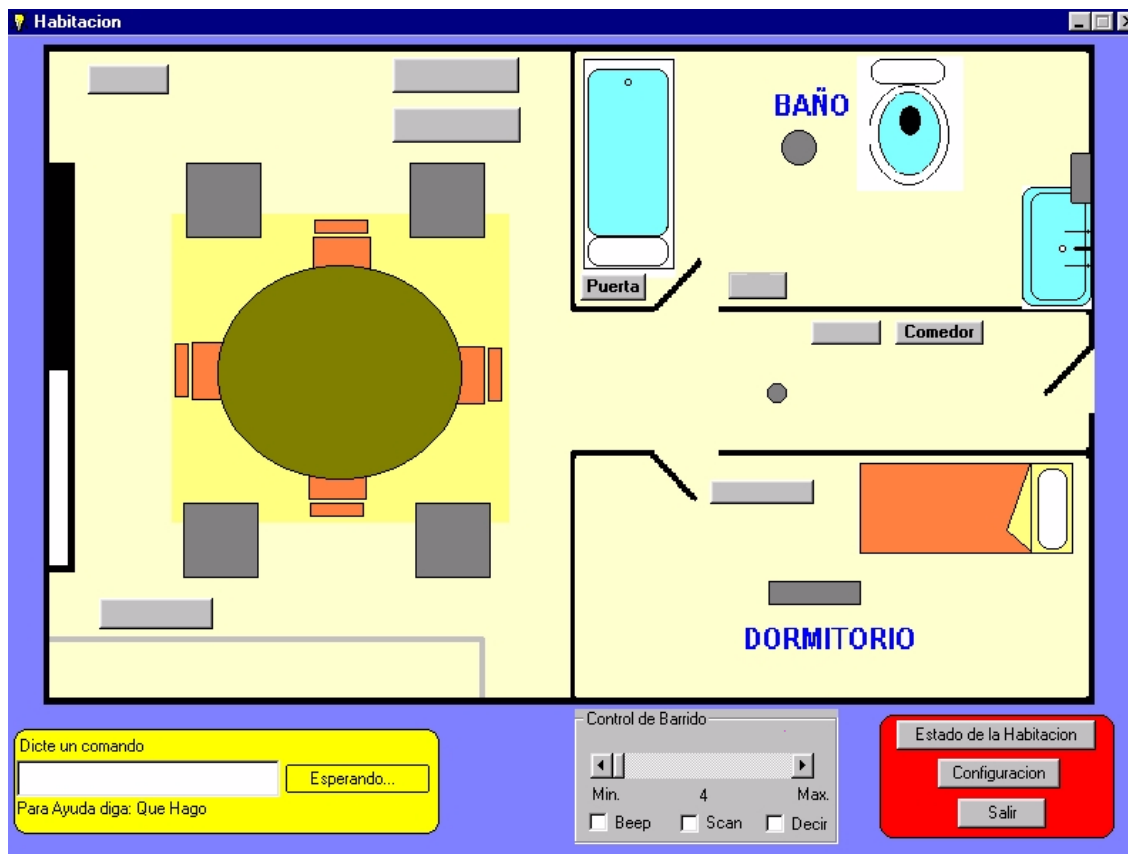

Características:

- Controlar hasta un máximo de 256 artefactos.
- Respuesta bidireccional con cada artefacto. Ejemplo si enciendo una luz desde la llave de pared el sistema indicará “Luz comedor encendida”, si la apago desde el computador el sistema indicará “Luz comedor apagada”, se puede preguntar el estado general de la casa, si las luces están apagadas, si las puertas y ventanas están cerradas y si las cortinas y persianas están bajas.
- Utiliza un cable tipo telefónico de 4 hilos.
- Si el usuario desea colocar intercomunicadores entre las habitaciones se agrega solamente un 5to hilo.
- Se puede manejar a través de la voz.